

快速入门手册

4K术野摄像机



NDI 是Vizrt Group的注册商标

●建议您在使用本产品前仔细阅读本产品的使用说明书。为避免您的人身安全及设备受到物 理或电损伤,请严格按照本说明书或专业人员的指导进行安装使用本产品。错误的电气连接 或物理安装方式将可能造成设备的永久损伤,甚至威胁您的人身安全。

1.产品清单

名称	单位	数量
4K 摄像机	台	1
电源适配器	\uparrow	1
快速入门指南	本	1
HDMI线	根	1

2.设备接口



(后盖拆下)

1	RS232控制接口	5	HDMI输出
2	LAN/PoE+/ NDI® HX3	6	SDI输出
3	3.5mm音频输入	7	RS485/422控制接口
4	DC 12V 电源接口		

3.设备安装与连接

1) 安装

使用设备底部的三脚架螺丝孔将其固定到安装臂上。



取下后盖,将电线和提供的钢丝绳穿过后盖,然后如图所示将它们连 接到设备后部,然后拧紧后盖。

2)系统配置示例

可将MediCam与医疗录像机、显示器等设备结合使用组成个性化系统。例如,可使用键盘、面板按钮、电脑、平板等多种方式设置 MediCam的白平衡、曝光、聚焦、图像参数。

系统配置图



3)连接网络

用网线将MediCam连接到具有路由器或DHCP功能的网络。



4) 串口连接

(1)RS232引脚定义如下:

$$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \overbrace{9^{\bullet \cdots \bullet} 6}^{5 \cdots \cdots 1} \oslash$$

母头引脚定义				
1	DCD	数据载波检测		
2	TXD	数据发射		
3	RXD	数据接受		
4	DTR	数据终端准备		
5	GND	地线连接处		
6	DSR	数据设备准备		
7	RTS	请求发送		
8	CTS	清除发送		
9	RI	振铃指示		

为确保一端的RXD与另一端的TXD连接,请确保控制MediCam设备的 接口。若控制MediCam的设备为公头,请采用直连的方式,如下图所 示:



若控制MediCam的设备为母头,请采用交叉连接的方式,如下图所示:



(2)对于RS485接口,请采用直连的方式,如下图所示:



(3)对于RS422接口,请采用直连的方式,如下图所示:



5) 连接电源

(1) DC 供电

DC电源适配器为MediCam供电后,状态指示灯将亮起。



(2)PoE供电

MediCam还可以通过以太网(PoE/PoE+)供电,无需电源适配器。若用PoE供电,必须将网线连接到PoE网络交换机,网线至少为CAT5e网线。

6)网络控制

MediCam提供了四种便捷快速的方式登录网页控制界面。

(1) IP地址

MediCam的DHCP默认为开启状态。请连接HDMI/SDI输出到显示器 上,MediCam开启后IP地址将自动在左上角显示一段时间;或点击 MENU按键唤出OSD菜单查看IP地址。在同一局域网中的手机或电脑 的浏览器中输入IP地址登录网页控制界面。



(2) 通过mDNS登录MediCam请在电脑或手机浏览器中输入http://medicam-xxxxx.local



(3) 通过设备扫描登录MediCam

如果您已经有MediCam或ZowieBox等产品,您还可以直接通过设备 扫描登录新的MediCam。登录网页控制页面,依次点击"设置->配置 预览"使用发现功能。点击"扫描"后,找到与新MediCam标签上一 致的设备序列号并点击便可快速跳转到该设备的网页控制界面。



(4) 故障安全IP

当连接的网络没有DHCP功能或通过网线直接将MediCam连接到电脑 或发生其他未知错误时MediCam的IP将变为故障IP(192.168.5.16 8).请在计算机上添加192.168.5.x的网段以登录网页控制界面。详细 配置请参阅用户手册。

提示:

用户名:admin;密码:admin

(5) 通过手机或平板登录

若用户在电脑端登录网页控制界面后需要使用手机登录网页控制界 面,请确保手机与MediCam在同一局域网中,并扫描网页左下角的二 维码登录网页控制界面。



4.控制面板

1)按键



2) 多功能切换

点击Fn按钮可使用+-进行不同的操作,具体操作如下表所示:

FN	+	-
曝光补偿	曝光补偿增加	曝光补偿减少
亮度	亮度增加	亮度减少
录像/拍照	开始/结束录像	拍照
手动聚焦	聚远	聚近

3) 状态指示灯

可根据不同的颜色获取MediCam的工作状态。

颜色	说明
红色	1.开机 2.不可修复故障
黄色	1.升级 2.休眠中 3.可修复故障 4.镜头自检中
绿色	正常工作中
绿色闪烁	按键短按
绿色连续闪烁	按键长按

5.编码模式

1) 切换至NDI编码模式

MediCam可分为普通编码模式与NDI编码模式。支持高达4k30的输出 与编码;支持编码RTSP、RTMP(S)、SRT与NDI(HX/HX2/HX3)流。 切换到NDI编码模式请先登录网页控制界面依次点击"设置->系统设置



medid	/R	预览 设置 退出
 ・ ・	设备属性 NDI® 用户管理	系統时间 恢复重启 固件升级 日志
 回 视频配置 ~ 1% 音频配置 1% 募级配置 ~ 	授权激活NDI® 已激活	
 品 网络配置 ◎ 系统设置 		

激活后登录网页控制界面后依次点击"**设置->媒体配置->NDI**"打开 NDI按钮并重启以开启NDI编码模式。

medid	/R		预览	设置	退出
◎ 配置预览					
◎ 相机配置 ~	NDI®				
回视频配置 ~					
11 音频配置	质量	NDI® HX3		~	
◎ 媒体配置 ^	设备名称	MediCAM-10001			
本地流	组	Public]	
网络流					
录像	多/组播				
NDI® 品 网络配置	网络前缀	239.255.0.0			
◎ 系统设置	网络掩码	255.255.0.0			
	TTL	1			
版本信息 三 硬件版本 7.4.2 同件版本 1.0.0.16		(¥77			

2)NDI连接

兼容软件:



MediCam切换到NDI编码模式后,支持大部分NDI软件在同一局域网 内自动发现MediCam。例如在NDI 5 Tool中直接选择需要播放的设 备。

	ZOWIEBOX	>	
~	MEDICAM	>	✓ MEDICAM -111111
	Mana		

提示:

若电脑无法搜索到所有NDI设置:

A、检查电脑是否可以登录MediCam的网页控制界面。

B、请关闭VPN等相关软件

C、请检查使用的为专用网络或是公用网络,并检查在 "允许应用通过 防火墙"中是否允许了所有NDI软件通过。

(19) 防火墙和网络保护

哪些人和哪些内容可以访问你的网络。

)統和安全 > Windows Defender 防火塘 > 允许的应用	~ C	搜索控制面极
	允许应用通过 Windows Defender 防火環进行運信 者要表加、要求成調解所先許的应用和調口、清華主要及设置。 允许应用低行還信有考虑风险?		更改设置(N)
空に「見てい」	↔注約应用和功能(Δ):	_	
鉛 专用网络 (使用中) 防火墙已打开。	Antibular between the second s	参用 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
□ 公用网络	NDL_VirtualInput NDLVirtualInput NDLVirtualInput	88	8 8 8
防火墙已打开。		洋细信息(1)	删除(<u>M</u>)
允许应用通过防火墙 网络和 Internet 疑难解答程序 防火墙通知设置 高级设置 将防火墙还原为默认设置		允许其() 改 定	2位用(3) 取消

6.本地流

通过本地流,用户可以在同一局域网中实时查看编码设置的效果。

1) 依次在网页控制界面中点击"媒体配置->本地流"

2) 点击右侧图标复制主码流或次码流的地址。

me⊚i⊡	VR		预览	设置	退出	中文 ~	MediCAM-10001 (
⑦ 配置預览							
◎ 相机配置 ~	本地流						
□ 視频配置 ~	-	main/av		rtsp://192.168	1.100:8554/main/av		Ð
制音频配置	-	aublau		dep://102.169	1 100-9664/aub/au		-
圆媒体配置 🗠	-	Sublay		hsp.//182.100	1.100.0004/Subrav		Eh
本地流							
网络流							

7.网络流

1) 在网页上依次点击"媒体配置->网络流"。

2) 点击"+添加"创建新网络流任务。

3)选择与推流地址相同的协议并输入推流地址和密钥,无推流密钥可 略过。

4) 输入该网络流任务名称后点击保存,该名称将显示在预览界面以便 操作。

5) 打开推流按钮开始推流。

medid	/R	3	页览	设置	退出	中文 ~	MediCAM-	10001	Ô
 (*) 配置预览 (*) 相机配置 ~ 	网络流						+7	动口	
E 視頻配置 ~ 11. 音頻配置	• N	fediStream 10-য়	RTMP	在线 12871	kbps		ŧ	Ē	
國 媒体配置 ^ 本地流 网络流		名称							
录像 NDI®		推派地址 推流秘明							
□ 网络配置 ○ 系统设置		香注	8.0						
10+00 /0									

8.恢复出厂设置与重启

1)重启MediCam

在网页控制界面点击"**系统设置->恢复重启->重新启动"**即可。 2)MediCam恢复出厂设置

(1)在网页控制界面点击"系统设置->恢复重启->恢复出厂设置"。 (2)点击面板按钮MENU,唤出OSD选择恢复出厂设置。

9.固件升级

1)在网页控制界面点击"系统设置->固件升级"。
 2)点击选择文件上传正确的固件。
 3)点击升级即可

提示:

点击升级后,MediCam将自动升级并重启,此过程将消耗几分钟,在此 期间请保持MediCam的网络流畅与电源稳定,否则将导致升级失败。

10.保修

我们为您的4K术野摄像机提供:

18个月硬件保修 终身软件维护

更多常见相关问题解答和信息访问:

或联系我们:

⊠support@zowietek.cn €400-080-3050

专业的相机、视频编解码、录像方案供应商

上海泽纬特电子有限公司

中国·上海浦东沪南路2218号西楼1701 型号:30631-XYZ

zowieTek 是上海泽纬特电子有限公司注册商标